

Pflege und Sterilisation von KaVo INTRA® Instrumenten und KaVo INTRA® Köpfen

Die Pflege der INTRA Instrumente und INTRA Köpfe muss 2x täglich, mittags und abends sowie vor jeder Sterilisation mit KAVOSpray bzw. SPRAYrotor durchgeführt werden. Die Sterilisation erfolgt im Autoklaven bis max. 135 °C.

Zur Minimierung der Infektionsgefahr muss die Pflege der KaVo Aufsatzinstrumente immer mit Schutzhandschuhen durchgeführt werden.

Überschüssiges Pflegemittel kann in den Motor eindringen und die Funktion beeinträchtigen. Daher 1x täglich Motorhülse abnehmen und Motorgehäuse mit einem trockenen Tuch abwischen.




Bohrer entfernen.

Nicht in Desinfektionsbäder legen!



Mindestens 1x wöchentlich zur zusätzlichen Pflege des Spannsystems von vorne mit dem Sprühnippel in das Spannsystem sprühen. Anschließend nachfolgenden Pflegevorgang durchführen.

INTRA Unterteil bzw. Handstück auf passenden Ansatz des KaVo Pflegemittels aufsetzen und durchsprühen. Wir empfehlen, original KaVo Pflegemittel zu verwenden! Bei starkem Schmutzaustritt Pflegevorgang wiederholen.



Zur Reinigung mit QUATTROcare werden die Instrumente auf die Pflegekupplung aufgesetzt. Dauer pro Instrument: 20 Sekunden. Instrumente vor der Abnahme zuerst außen gründlich abwischen.

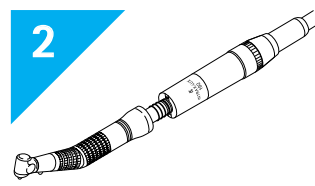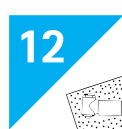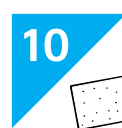


Instrument von der Motorkupplung abnehmen.

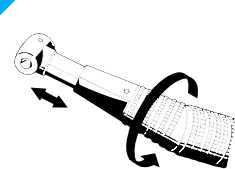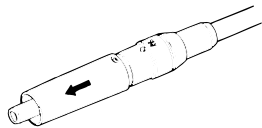



INTRA Köpfe zur nachfolgenden Pflege vom Unterteil abnehmen.

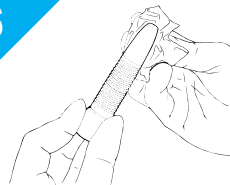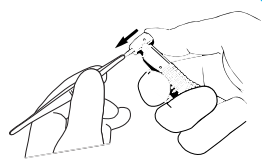



Äußerlich durch Abbürsten unter fließendem Wasser oder mit einer Alkohollösung reinigen. Nicht in Ultraschall Reinigungsgeräte legen, da sonst Funktionsstörungen auftreten können!

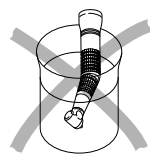


Instrumente mit diesem Symbol sind im Thermodesinfektor waschbar. Dies ist nur mit dem Original KaVo Waschständer zulässig. Vor und nach jedem Waschvorgang Pflege.

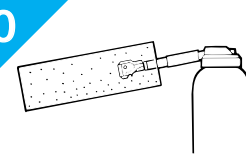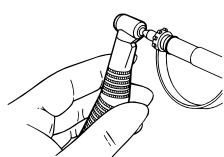

INTRA Kopf in den passenden Ansatz des KaVo Pflegemittels einsetzen und intensiv durchsprühen. Andere Pflegemittel sind nicht zulässig! Bei starkem Schmutzaustritt Pflegevorgang wiederholen.

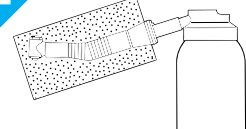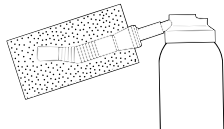

INTRA Winkelstücke mit roter Farbkodierung immer komplett auf den passenden Ansatz des KaVo Pflegemittels aufsetzen und durchsprühen. Wir empfehlen, original KaVo Pflegemittel zu verwenden! Bei starkem Schmutzaustritt Pflegevorgang wiederholen.

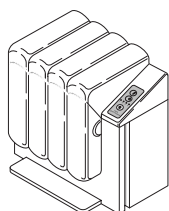

INTRA Instrumente und INTRA Köpfe offen oder in Sterilisationstüben bis max. 135 °C im Autoklaven oder im Schnellsterilisator sterilisieren. Nach der Sterilisation Instrumente sofort aus dem Sterilisator entnehmen.

Hinweis

Vor Inbetriebnahme Instrument auf Motor aufsetzen, mehrere Sekunden laufen lassen und eventuell austretendes Öl abwischen.

Die Handhabungs- und Wartungshinweise entnehmen Sie bitte der jedem Produkt in der Verpackung beigelegten Gebrauchsanweisung.

